



ペルビッキー Pelvicky

医 05 外科・整形外科用手術材料
一般医療機器：成形型副木
JMDN コード：36204000
届出番号：15B1X10003000040

骨折した骨盤を安全に固定します。装着したまま、カテーテルの処置が可能で、X線やCT・MRIを妨げない素材です。



バックルを差し込めば、引っ張るだけの簡単装着！

ベルトは、素早くしっかり密着！

上下に分れている為、鼠径部が開放されている構造

商品名	ペルビッキー (レギュラーサイズ)	ペルビッキー (スモールサイズ)
品 番	PV-01	PV-02
カラー	ブルー	グリーン
全体長さ	約 150cm	約 125cm
パット部分長さ	約 87cm	約 70cm
対応臀部サイズ	約 83 ~ 128cm	約 68 ~ 103cm
重 量	約 380 g	約 320 g


1

患者の臀部周辺の異物（ポケット中身など）を取り除き、何も無い状態を確認する。ペルビッキーの黒い面を上にして、患者の臀部下に差し込む。




2

バックル差込を受口に入れる。上下共にカチッと音が鳴るまで差し込む。

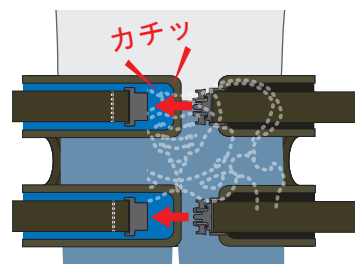


3

左右のストラップを掴み、引っ張る。＜2人で上下同時に左右から引っ張る事が望ましい＞

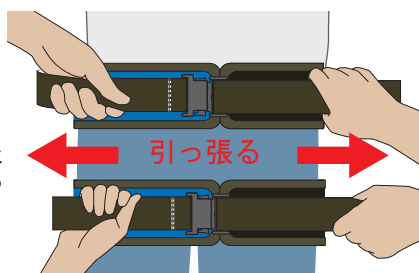

4

3番の引っ張った状態で、マジックテープ側のストラップを引っ張りながら、表面にしっかり押さえつけ留める。

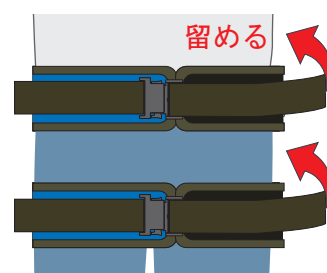

取扱総代理店

JM ジェイメディカル株式会社
新潟県新潟市東区紫竹卸新町 1808-22
TEL : 025-272-3311 FAX : 025-272-3321
E-mail : pelvicky@jeimedical.com

製造販売元



JMR 株式会社 許可番号 15B1X10003
新潟県新潟市西蒲区大原 641
TEL : 0256-77-8808 FAX : 0256-77-8809
E-mail : info@jmr-lab.com